

Dräger SSK 5000 Compresores fijos

Ideal para la detección rápida de drogas, el sistema de recogida de muestras Dräger SSK 5000 es rápido y fácil de utilizar. Cuando se utiliza con Dräger DrugTest® 5000, la muestra puede transferirse a un casete de prueba para establecer si existe una contaminación por droga. La muestra puede guardarse y transportarse para realizar análisis posteriores.



Ventajas

Pruebas de superficie

El Dräger SSK 5000 consta de un frasco que contiene una solución tampón y un bastoncillo integrado en la tapa para muestreo. Este se utiliza para deslizarlo sobre superficies y realizar pruebas de drogas mediante el sistema Dräger DrugTest® 5000.

Pruebas de confirmación

La sustancia de las superficies y la formulación desconocida que se transfieren a la solución tampón utilizando el SSK 5000 pueden almacenarse y transportarse de forma segura en el contenedor de muestras. Para la dosificación del líquido, el contenedor de muestras puede modificarse para obtener una botella de goteo mediante una tapa de rosca especial. El líquido que va a analizarse puede separarse o reducirse para análisis posteriores mediante goteo.

Sustancias desconocidas

Utilice el bastoncillo del SSK 5000 para obtener pequeñas cantidades de, por ejemplo, una formulación granular desconocida; transferirla a la solución tampón y analizarla en busca de drogas mediante el sistema Dräger DrugTest® 5000.

Productos relacionados



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Tomar una muestra de saliva es rápido y fácil con Dräger DrugTest® 5000. La muestra recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.

Productos relacionados



ST-13226-2007

Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas: Dräger DCD 5000 no solo permite recoger fácilmente muestras de saliva, sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio para su análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el trayecto.



D-10639-2011

Dräger DrugCheck® 1200 STK

Método fiable para prevenir el abuso de drogas de una manera rentable. Puede detectar drogas en saliva de manera fácil y rápida.

Información para pedidos

Dräger SSK 5000

Dräger SSK 5000, 20 piezas	83 20 490
Tamaños del paquete: 20 dispositivos de recolección llenos de disolución tampón con tapa con bastoncillo	

Dräger DrugTest 5000

Analizador Dräger DrugTest 5000, 1 pieza	83 19 900
Sets de prueba Dräger DrugTest 5000, 20 piezas	83 19 970

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

